

آموزش maintenance cell counter sysmex kx21

۱- شست و شوی روزانه

پس از اتمام کار با دستگاه دکمه SHUT DOWN روی صفحه کلید فشاری دهیم و محلول (CELL CLEAN) را به عنوان نمونه به دستگاه می دهیم پس از اتمام کار دستگاه را با دکمه پاور (سمت راست دستگاه) خاموش می کنیم

۲- در پایان هر روز چمبر TRAP (محفظه شیشه ای سمت چپ دستگاه) را چک میکنیم در صورتی که محلول درون آن بود در جهت عقربه های ساعت چرخانده و باز میکنیم محلول را خالی کرده و چمبر را سر جای خود نصب میکنیم

شست و شوی هفتگی

srv را باز کرده و قطعه وسط را به مدت ۱۵ دقیقه درون محلول clean

قرار می دهیم سپس با آب مقطر شست و شوی داده و در جای خود نصب میکنیم

شست و شوی ماهانه

اجرای برنامه select 71 و سپس محلول کلین را بعنوان نمونه به دستگاه می دهیم و با زدن دکمه استارت دستگاه به مدت ۱۵ دقیقه مسیر تخلیه راست و شومیدهد

اجرای برنامه select 72 که مربوط به شست و شوی تراندیوسر است ۱/۵ سی سی محلول کلین درون هر کدام از چمبرهای wbc و rbc می ریزیم و با زدن دکمه استارت دستگاه به مدت ۵ دقیقه شست و شومیدهد

شست و شوهای در صورت نیاز

Auto rins(select 5)

rins cup شست و شوی

تمیز کردن اپرچر rbc & wbc با برس مخصوص

waste تعویض محفظه

شرکت عمران طب ایرانیان

مهندس حیدری

۰۹۳۷۵۰۰۱۹۳۶